



THE POINT

ORTHODONTIC SOLUTIONS



UNIKO

Informazioni utili e modo d'uso

Paziente

UNIKO

JUST ONE SOLUTION

UNIKO

TRATTAMENTO ORTODONTICO PRECOCE

UNIKO fa parte dei dispositivi impiegati in **Ortodonzia preventiva e intercettiva**, che vengono utilizzati durante le fasi attive della crescita dentale per consentire un **allineamento dentale corretto e funzionale**

UNIKO guida il paziente a una corretta **chiusura delle labbra**, consentendo il **recupero della respirazione nasale** fisiologica e una **corretta posizione della lingua**.

Questo, unitamente alla forza ortodontica applicata da UNIKO, permette di ottenere un profilo equilibrato prima dell'eruzione dei denti permanenti.



COSA TROVI DENTRO ALLA SCATOLA

1

UNIKO

Il dispositivo è realizzato in materiale termoplastico morbido ed è completamente metal-free.

2

CUSTODIA

La custodia protegge il dispositivo dalla polvere, garantendo allo stesso tempo il ricircolo dell'aria per evitare la comparsa di cattivi odori o formazioni batteriche.

3

APPFRESH

Liquido e spazzolino per la detersione e igienizzazione degli apparecchi ortodontici. Ha un'azione profonda, rimuove le macchie, dona 24h di igiene e dura 2 mesi.



CONSIGLI PRATICI



Quando uso il mio apparecchio?

L'apparecchio va usato di giorno, alternando mezz'ora sì, mezz'ora no, per un massimo di 2 ore, eseguendo gli esercizi di masticazione mostrati dall'ortodontista.

Si consiglia di usarlo in casa nei momenti di pausa e relax. Non va usato a scuola o durante l'attività sportiva. Inoltre, va tenuto tutta la notte al fine di mantenere il risultato ottenuto durante la giornata.



Come lo lavo?

Il dispositivo deve essere **risciacquato dopo ogni utilizzo** con acqua fredda e disinfettato una volta al giorno con **AppFresh**. Si consiglia di non immergere il dispositivo nel collutorio in quanto potrebbe danneggiarne la superficie. In caso di necessità, contattare il medico dentista.



TRATTAMENTO FUNZIONALE UNICO

UNIKO è un **dispositivo ortodontico funzionale** progettato su misura per rispondere alle tue esigenze.

Realizzato digitalmente in **materiale plastico morbido**, si adatta perfettamente alla tua bocca.

L'**azione simultanea su entrambe le arcate dentali** (superiore ed inferiore) rende il trattamento più rapido e la correzione più stabile nel tempo.

Il principio alla base di questa tecnica ortodontica, chiamato "**occlusione guidata**", mira a favorire la corretta eruzione dei denti e lo sviluppo delle arcate verso una forma ideale, assicurando corretti rapporti occlusali, trasversali, sagittali e verticali.





The Point Orthodontics



the_point_orthodontics



www.thepointorthodontics.com



segreteria@thepointorthodontics.com



Scannerizza il QR code e scopri tutto quello che c'è da sapere su

Uniko



Numero Verde

800 598 328