



THE POINT

ORTHODONTIC SOLUTIONS



ARC ANGEL

Informazioni utili e modo d'uso

Paziente



Arc Angel

Guida il tuo sorriso.

ARC ANGEL

IL SEGRETO DI UN SORRISO PERFETTO

Il sistema Arc Angel consiste in una serie progressiva di **mascherine rimovibili**, realizzate su misura in **materiale termoplastico completamente trasparente**.

Questi dispositivi medici consentono la **correzione di anomalie dentali** in relazione ad un graduale spostamento dei denti programmato con il tuo dentista a cui corrisponde la sostituzione periodica di una serie di allineatori.

Arc Angel si sviluppa attraverso una **tecnologia d'avanguardia completamente digitale**.

Risulta di semplice applicazione, massima efficacia, assolutamente trasparente, garantito dalla qualificata assistenza italiana.

Arc Angel è l'allineatore dentale di **THE POINT**, leader italiano nello sviluppo di servizi e prodotti per l'odontoiatria.



Utilizza il codice QR per avere maggiori informazioni sugli allineatori Arc Angel.

COSA TROVI DENTRO ALLA SCATOLA

1

ALLINEATORI ARC ANGEL

Dispositivi numerati progressivamente all'interno della scatola da sostituire nel corso dell'intero trattamento.

2

APPFRESH

Liquido e spazzolino per la detersione e igienizzazione degli apparecchi ortodontici. Ha un'azione profonda, rimuove le macchie, dona 24h d'igiene e dura 2 mesi.

3

CUSTODIA

La custodia protegge gli allineatori dalla polvere e dalla comparsa di cattivi odori o formazioni batteriche. Inoltre, ti permette di portare sempre con te il tuo allineatore.

4

CHEWIES™ ALIGNER TRAY SEATERS

Piccoli rulli che servono per aiutare ad eliminare eventuali vuoti d'aria tra i denti e gli allineatori una volta indossati.

CONSIGLI PRATICI



L'allineatore deve essere applicato per **20-22 ore al giorno** e rimosso esclusivamente durante i pasti e l'igiene orale.



Si consiglia di **rimuovere gli allineatori durante i pasti** e di procedere alle consuete norme di igiene orale individuale prima di riapplicarli (spazzolino, filo interdentale).

È sconsigliato bere bevande quali caffè, tè, vino rosso, etc... mentre si indossano gli allineatori per evitare di macchiarli.



La cura giornaliera degli allineatori si effettua con il **detergente igienizzante AppFresh** fornito con i dispositivi, una goccia per un'igiene sicura e una freschezza duratura. Si consiglia di non immergere le mascherine nel collutorio perché potrebbe danneggiarne la superficie e renderla opaca.



La **sostituzione** degli allineatori è prevista ogni **14 giorni**, seguendo la numerazione progressiva indicata sulla busta (o il codice in rilievo sulla mascherina). Verranno consegnate un numero sufficiente di mascherine da utilizzare sino all'appuntamento successivo.



Seguire le **istruzioni e indicazioni** del **proprio medico dentista**. Conservare sempre l'ultima coppia di mascherine rimossa perché potrebbe servire in caso di perdita o rottura degli allineatori in uso. In questo caso contattare immediatamente il proprio medico.

LA SOLUZIONE PER IL TUO SORRISO

L'efficacia e l'affidabilità di Arc Angel sono garantite dalla capillare diffusione nazionale di tutti i laboratori THE POINT, che nell'ultimo triennio hanno prodotto oltre 180.000 allineatori per una nuova generazione di clienti soddisfatti, felici e soprattutto sorridenti.





The Point Orthodontics



the_point_orthodontics



www.thepointorthodontics.com



segreteria@thepointorthodontics.com



Scannerizza il QR code e scopri
tutto quello che c'è da sapere su
Arc Angel



Numero Verde

800 598 328